


Notice d'assemblage et d'utilisation des boîtes pour objets coupants, tranchants et perforants Modèle SEPTOECO – Référence PBS NEW

ASSEMBLAGE DU COUVERCLE ET MISE EN SERVICE DE LA BOITE

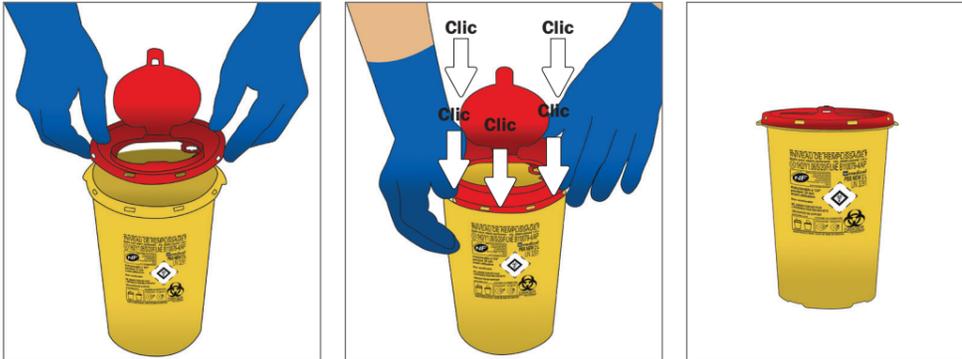

Positionner le couvercle sur le récipient avec l'orifice d'introduction des déchets côté marquage. Presser tout autour du couvercle avec la paume de la main, jusqu'à entendre les 8 déclics

UTILISATION DE LA BOITE POUR OBJETS COUPANTS, TRANCHANTS ET PERFORANTS



FERMETURE PROVISOIRE:
Appuyer au centre (1 PROV) jusqu'au déclic

POUR LA RÉOUVERTURE:
Appuyer sur la languette et soulever le système de fermeture jusqu'à l'ouverture du couvercle



Indiquer sur la boîte, la date de mise en service dans l'emplacement prévu à cet effet




FERMETURE DÉFINITIVE:
Appuyer avec les pouces sur les 2 empreintes (2DEF) jusqu'au déclic

RESPECTER LE NIVEAU DE REMPLISSAGE

↑ NIVEAU DE REMPLISSAGE ↑

Notice d'assemblage et d'utilisation des boîtes pour objets coupants, tranchants et perforants Modèle SEPTOECO – Référence PBS NEW

UTILISATION DES DISPOSITIFS DE DÉSOLIDARISATION

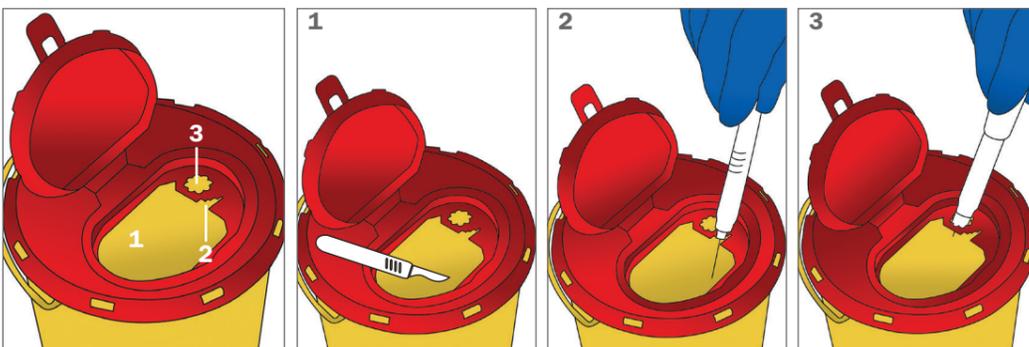


1 Bistouris, dispositifs médicaux sécurisés

2 Aiguilles embases et aiguilles de prélèvements sous vide

3 Aiguilles de stylos injecteurs

DÉSOLIDARISATION DES AIGUILLES DES STYLOS À INSULINE

1 - Introduire l'aiguille dans l'encoche en forme de marguerite
2 - Appliquer sur le stylo un mouvement du bas vers le haut (Effet bras de levier)
3 - Commencer à dévisser l'aiguille du stylo injecteur

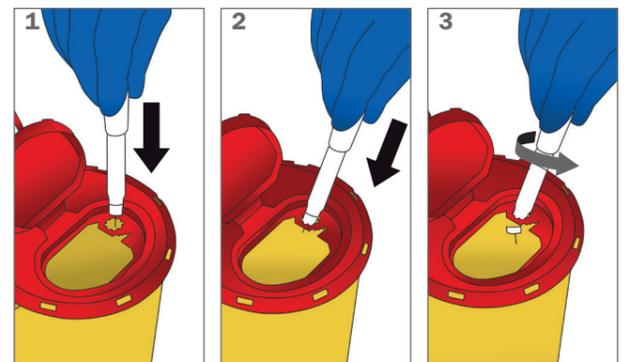

SUPPORTS ET PLATEAUX DE SOINS

Afin de stabiliser la boîte au plus près des soins, nous proposons une gamme de supports avec fixation:

- ▶ Plan de travail
- ▶ Sur le montant du chariot
- ▶ Sur rail normalisé
- ▶ Sur plateau de soins

RECOMMANDATIONS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ▶ Ne pas remplir la boîte au-delà de la limite de remplissage indiquée
- ▶ Mettre en place la fermeture provisoire entre deux utilisations
- ▶ Élimination de l'objet piquant, coupant ou tranchant dans la boîte dès la fin de l'acte médical
- ▶ Vérifier la bonne mise en place de la fermeture définitive avant l'élimination finale de la boîte